

## **INSTRUÇÕES PARA COLETA DE SANGUE EM PAPEL DE FILTRO**

1. Massageie o dedo a fim de ativar a circulação sanguínea. Faça a assepsia do local a ser puncionado com o sachê de álcool 70% e espere secar.
2. Remova a parte protetora para liberar a lanceta estéril e puncione firmemente a lateral da ponta do dedo (a punção lateral machuca menos). Recomendamos que seja utilizado o dedo médio e anelar.
3. Faça uma leve compressão, seguida por uma descompressão no local puncionado para aumentar a circulação sanguínea e obter uma boa gota de sangue. Se necessário faça movimentos no dedo de baixo para cima a fim de aumentar o tamanho da gota.
4. Aplique o sangue na área demarcada do papel de filtro.
5. Após preencher o primeiro círculo, repetir os itens 3 e 4 para os outros círculos e deixar secar ao ar à temperatura ambiente.
6. Feche o cartão seguindo as instruções descritas no mesmo, evitando colocar as mãos na amostra. **ATENÇÃO:** Não se esqueça de identificar o cartão coletor!
7. Insira o cartão coletor no envelope plástico e sele.
8. Coloque-o num envelope, juntamente com os demais documentos solicitados pelo laboratório e envie a amostra pelo correio (Sedex) para o endereço abaixo:

Laboratório Genotyping

Av. Deputado Dante Delmanto, 1649 – Vila Paulista

Botucatu – SP

CEP: 18608-393